

## Näin vaihdat elektrodin

ZOLL AED Plus defibrillaattoriin




- 1 Aseta laite tasaiselle alustalle eteesi.



- 2 Avaa laitteen kansi.



- 3 Irrota elektrodin liitin.

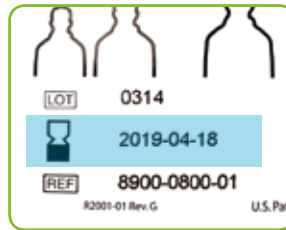

- 4 Ota uusi elektrodipari paketista ja tarkista sen voimassaoloaika tiimalasin kohdalta paketista.



- 5 Kytke liitin paikoilleen.



- 6 Taita elektrodipaketin kulmat niin, että se asettuu laitteen kanteen.



- 7 Työnnä keltainen suikale kannen raon kautta esiin.



- 8 Sulje lopuksi laitteen kansi.

Elektrodi on nyt vaihdettu ja laite on valmis paristojen vaihtoa varten.

Lue ohjeet  
kääntöpuolelta.

## Näin vaihdat paristot

ZOLL AED Plus defibrillaattoriin



- 1 Aseta laite eteesi tasaiselle alustalle pohjapuoli ylöspäin.




- 2 Avaa paristokotelon kansi kolikolla tai avaimella painaen kahta paristokotelon koloa yhtäaikaaisesti.  
Avaa kansi tästä toisella kädelläsi.



- 3 Poista kansi ja vanhat paristot. Asenna uudet paristot napamerkintöjen mukaisesti. Laite kehottaa "Asenna paristot", kunnes kaikki paristot ovat paikoillaan.



Kaikki 10 paristoa tulee vaihtaa samalla kertaa.  
Käytä vain Duracell tai Power One paristoja.  
ÄLÄ käytä Panasonic, Varta tai Rayovac paristoja.

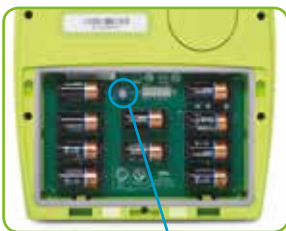

- 4 Paristojen asennuksen jälkeen paristojen varaustila tulee nollata.

Paristojen asennuksen jälkeen laite kehottaa: "Jos paristot ovat uudet, paina painiketta".



Jos elektrodi ei ole paikallaan, defibrillaattori muistuttaa siitä kehottaen: "Kytke kaapeli".



- 5 Sulje paristokotelon kansi.



- 6 Varmista, että etupuolen vasemman alareunan tilailmaisimessa näkyy vihreä ✓ -merkki.

Defibrillaattori on nyt käyttövalmis. Paristojen ja elektrodin säilyvyysaika valmiustilassa on 5 vuotta.

[defibrillaatori.fi](http://defibrillaatori.fi)