

Pikaopas tiedonsiirtoon

ZOLL AED Pro defibrillaattori USB-muistilla

Tarvittavat varusteet

PC seuraavat ohjelmistot asennettuina:

- RescueNet Code Review
(www.zolldata.com/rescuenet-code-review)
- Microsoft .Net Framework
(Microsoft-päivityksistä tai www.zolldata.com/c-r-downloads)
- USB-portti tietokoneessa



Ohjeistus

1. Avaa tietokoneella ohjelmisto **RescueNet Code Review**. Ohjelma avaa tyhjän sivun.
2. **Avaa AED Pron akun kansi** avaamalla etulukko ja nostamalla kansi.
3. Paina defibrillaattorin ON/OFF-painiketta 7-8 sekuntia.
4. Paina vasenta toimintonäppäintä **USB**.
5. Paina vasenta toimintonäppäintä **UUSI**.
6. **Aseta USB-muisti USB-porttiin** akun oikealla puolella (irrota kumisuojus nähdäksesi USB-portin).
7. AED Pro lukee USB-muistin tiedostot. AED Pro ilmoittaa **Tietoja ladataan. Tietojen lataus valmis**. Kun tiedonsiirto on valmis, **poista USB-muisti defibrillaattorista ja kytke se tietokoneeseen**.
8. Valitse RescueNet Code Review -ohjelmasta **Upload Case From USB**. Valitse valikosta USB-tiedosto ja **paina OK**.
9. **RescueNet Code Review** ohjelma näyttää koko tiedonsiirtoprosessin valintaikkunassa.
10. Paina File - Print - Case - Stripes - OK, jos haluat tulostaa tiedot.