

BRONCOFLEX® VORTEX

Kertakäyttöinen steriili videobronkoskooppi



axessvision
part of The Surgical Company

HIGH QUALITY VISION & SAFETY.
ANYTIME, ANYWHERE.

BRONCOFLEX® VORTEX


DISTAALINEN NAVIGOINTI

Laitteen muotoiltu distaalikärki on kapeampi kuin muissa kertakäyttöisissä bronkoskoopeissa, ja sen toimenpidekanavan sisähalkaisija on 2,8 mm. Sisään vietävän osan pienempi halkaisija ja leveä toimenpidekanava helpottavat keuhkoputkien distaalialueiden tutkimista. Broncoflex® Vortex voidaan asettaa endotrakeaaliputkiin, joiden halkaisija on vähintään 6 mm.



ERGONOMINEN JA HELPOSTI LIIKUTELTAVA

Kädensijaan on helppo tarttua, ja käytössä se on samankaltainen kuin uudelleenkäytettävät endoskoopit. Myös toimenpidekanavan käyttö ja tiivis biopsiventtiili ovat samanlaisia.

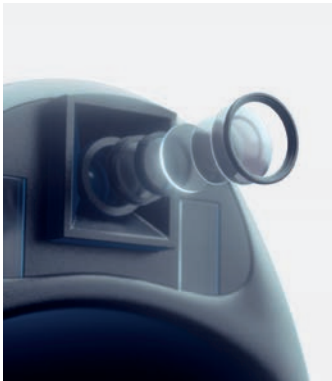

TERÄVÄPIIRTO- JÄRJESTELMÄ

Koko järjestelmä aina kamerasta näyttöjärjestelmään on kehitetty tuottamaan teräväpiirtokuvia, ja sen algoritmi on laadittu erityisesti ääriviivojen yksityiskohtaiseen esittämiseen. Kirkkaiden säätö mahdollistaa hyvän näkyvyyden lähelle ja kauas.



ERITTEIDEN HALLINTA

Leveä distaalikärjenaukkomuodostaa imukartion, jolla voidaan imeä eritteitä ja nesteitä endoskoopin distaalikärjen läheltä.

TEKNISET TIEDOT

OPTIIKKA	Kuvakentän suunta	0°
	Kuvakenttä	87,5°
	Kentän syvyys	5–50mm
	Kuvan resoluutio (pikseliä)	400×400
	Valaistusjärjestelmä	2 LED-valoa
SISÄÄNVIENTI- PUTKI	Ylös-/alaspäin taivuttamisen kulma	200°/200°
	Sisäänvientiputken ulkohalkaisija	5,4mm
	Distaalipään ulkohalkaisija	5,6mm
	Käyttöpituus	605mm
TOIMENPIDE- KANAVA	Sisähalkaisija	2,8mm
STERILOINTI	Eteenioksidi	
LAITTEIDEN YHTEENSOPIVUUS	Yhteensopiva intubaatioputken kanssa (sisähalkaisija)	6mm
	Kaksiluumeninen putki (sisähalkaisija)	41Fr
VIITTEET	Broncoflex Agile Broncoflex Vortex Screeni HD	20030001 10030001 30030000