


Verenpainemansetit Microlife-verenpainemittareihin

Sopivan verenpainemansetin valinta on vähintään yhtä tärkeä kuin itse verenpainemittari. Mansetin oikea koko ja muoto ovat oleellisen tärkeitä tekijöitä verenpainemittauksen tuloksen tarkkuudessa

Kaikissa Microlife-manseteissa on kokomerkintä, joka auttaa oikean koon valinnassa.

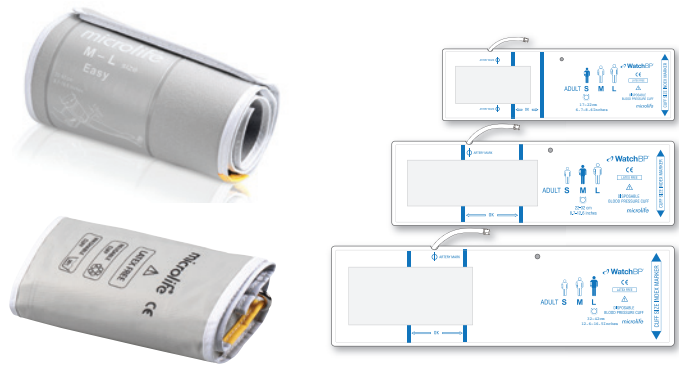

Täydellinen mansettivalikoima kaikille Microlife-verenpainemittareille

Microlifen mansettimallit ovat pehmeä (Soft) tai jäykkä (Rigid) värillisellä liittimellä, joka sopii pääsääntöisesti kaikkiin Suomessa myytäviin Microlifen verenpainemittarihin. Mansetteja on saatavana myös kertakäyttöisinä (potilaskohtainen), 20 mansetin paketissa.

Koko / Mitta (cm)	S / 17-22 cm	M / 22-32 cm	L / 32-42 cm	M-L / 22-42 cm	L-XL / 32-52 cm
Potilaskohtainen mansetti	X	X	X		
Pehmeä mansetti	X	X		X	X
Jäykkä mansetti				X	



Jokainen liitin on merkitty värikoodilla:

Sininen liitin on kalibroitu S-koon mansettiin

Harmaa liitin on kalibroitu M- ja M-L-koon mansetteihin

Musta/keltainen liitin on kalibroitu L- ja L-XL-koon mansetteihin

L-liitin on kalibroitu S-, M- ja M/L 3G-mansetteihin 2G-laitteissa ja BP A3L Comfort

Musta/musta liitin on kalibroitu L- ja L/XL 3G-mansetteihin 2G-laitteissa

Tarkan verenpainemittaus tuloksen varmistamiseksi ilman täytyy poistua mansetista tasaisesti. Microlifen liitoskappaleissa on integroitu kalibroitu liitin, joka optimoi jokaisen mansettikoon ilman poistumisnopeuden. Siksi on tärkeää valita oikea liitin oikean kokoisman mansetin kanssa.